



PODOSCÓPIO

Aparelho para visualizar a impressão plantar.

PODO*Tech*[®]

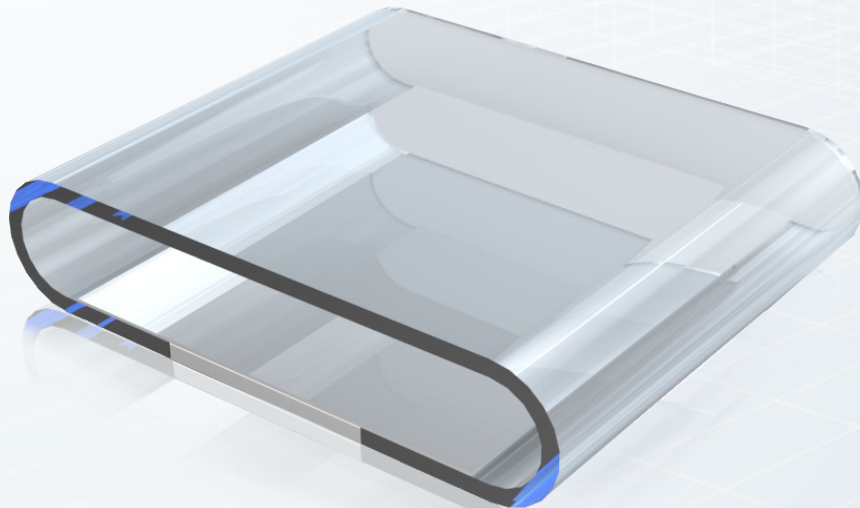



MODO DE USAR

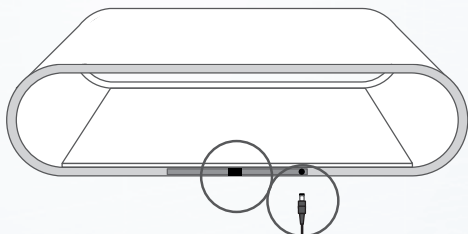


Conecte o cabo de alimentação ao aparelho.




Conecte a fonte de alimentação à rede elétrica.

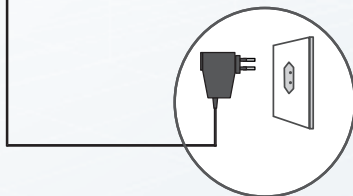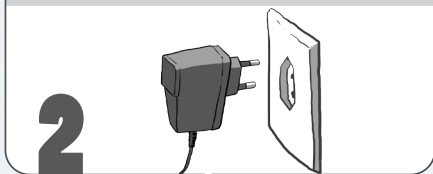

Ligue o equipamento.

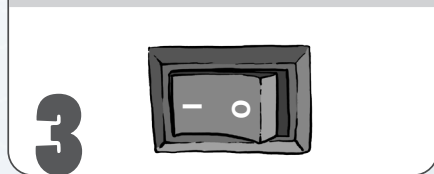

Peça para o paciente subir na plataforma.

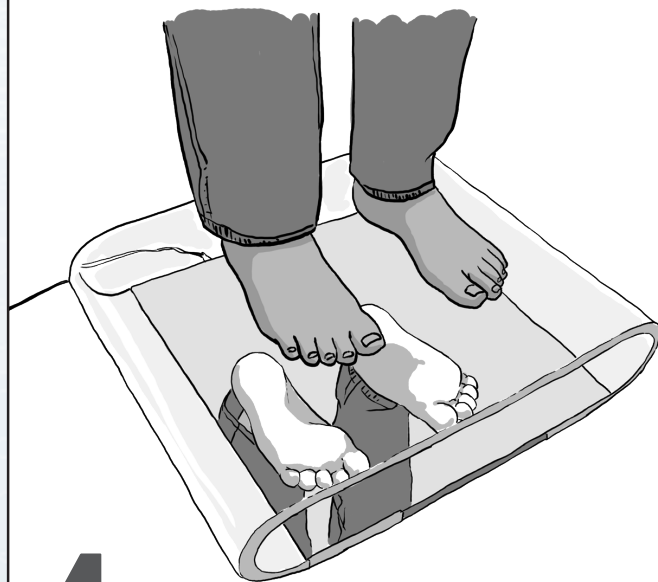



CERTIFICADO DE GARANTIA

O Podoscópio possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

Estão excluídos da garantia problemas gerados por acidentes mecânicos ou mau uso.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 550 x 450 x 123mm

Peso: 10kg

Peso máximo suportado: 150kg

Potência: 6W

Tensão: 100~240Vac

Frequência: 50/60Hz

Composição: acrílico, chapa metálica, LEDs, poliuretano

Plug: P4



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpar somente com pano umedecido com água e sabão neutro;

- **Não utilizar álcool para limpeza;**

- Não utilizar produtos químicos e abrasivos.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa possui um canal de comunicação para a assistência técnica, que pode ser solicitada via e-mail, telefone ou suporte online.

Fone: (43)3327-7007

E-mail: engenharia@hs.ind.br

Suporte online:

<http://www.podotech.com.br/assistencia-tecnica>



CONTATO

Endereço: Rua Marcos Tomazini, 158.

Portal de Versalhes I.

CEP: 86057-060

Londrina – PR – Brasil

Telefone/Fax: +55(43)3327-7007

Site: www.hs.ind.br

