

GUIA RÁPIDO - PROCEDIMENTOS DE USO

1)



Ajuste a temperatura e o tempo desejado para realizar a termocolagem das palmilhas.

2)



Pressione o Botão de Acionamento.
Espere até que a temperatura atinja a temperatura programada.



Para interromper, pressione novamente.



3)



Dois bipes de alerta indicam o fim desta etapa.


4)



Insira os materiais componentes da palmilha no interior da câmara de vácuo do Turbo Slim e pressione o Botão de Acionamento.



5)

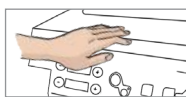

Pressione levemente a tampa do seu Turbo Slim para que a trava de fechamento possa atuar.

6)



Espere o tempo programado para a execução do processo de termocolagem.



Para interromper, pressione novamente.



7)



PROCESSO FINALIZADO!

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Não conecte itens que não são especificados como parte do sistema deste produto;
- Não derrube ou coloque peso sobre as peças deste equipamento;
- Não desmonte ou remonte nenhuma das peças deste equipamento;



ATENÇÃO: Não abra o equipamento e/ou tente consertá-lo. Isto pode agravar o problema e implicará na perda da garantia.

- Não aqueça nenhuma das peças acima dos valores máximos especificados neste manual;
- Não obstrua a saída de ar.

LIMPEZA

Para a boa conservação do equipamento, recomendamos os seguintes procedimentos para limpeza:

- Utilize pano umedecido com água e sabão ou detergente neutro.
- Após a limpeza, deixe o equipamento secar por alguns minutos.
- Não utilize produtos à base de cloro ou solventes.



ATENÇÃO: O produto não pode ser mergulhado em líquidos.