

MOLDADOR

Obrigado por escolher o **Moldador Podotech**.

O Moldador Rígido foi desenvolvido para auxiliar profissionais na moldagem de palmilhas, proporcionando estabilidade durante o processo de conformação anatômica das palmilhas aos pés do paciente.



Especificações Técnicas

Modelo: Moldador Rígido

Dimensões (comprimento x largura x altura):

330x145x80mm

Peso: 0,8kg

Composição: Poliuretano

Acompanha:

- 1 par de Moldadores
- Flyer com QR Code para acesso ao Manual de Instruções

Indicação de Uso

O Moldador Rígido é destinado ao apoio na moldagem de palmilhas, auxiliando profissionais durante o processo de conformação anatômica das palmilhas.

Destina-se ao uso em clínicas, consultórios e laboratórios especializados.

Cuidados e Segurança

Antes de utilizar o produto:

- Utilize o Moldador sobre uma superfície **plana, firme e nivelada**.
- Antes de cada utilização, verifique se o produto está limpo, íntegro e em condições adequadas de uso.
- Certifique-se de que a palmilha esteja corretamente posicionada sobre o Moldador antes de iniciar a moldagem.
- Mantenha o ambiente de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.
- Não utilize o produto caso apresente deformações ou qualquer outro dano que possa comprometer seu desempenho.
- Não utilize acessórios ou componentes que não sejam compatíveis com o produto.
- Não exponha o Moldador à chuva, umidade excessiva ou contato direto com água.
- Não exponha o produto à luz solar direta ou a fontes de calor por períodos prolongados.
- Mantenha o produto limpo e conservado após cada utilização.
- Armazene o Moldador em local seco, protegido do calor e fora do alcance de crianças.

Modo de Uso – Passo a Passo



Armazenamento

- Guardar em local seco e arejado.

- Evitar exposição direta ao sol.
 - Manter protegido contra impactos.
 - Não empilhar objetos pesados sobre o produto.
-

Limpeza e Conservação

Limpeza

- Limpe utilizando pano macio umedecido com água e sabão neutro.
- Seque completamente antes de guardar.
- Não utilize álcool, solventes ou produtos abrasivos.
- Não mergulhe o produto em água.

Conservação

- Evite quedas e impactos.
 - Não coloque objetos pesados sobre o Moldador.
 - Armazene em local seco, limpo e protegido da luz solar.
-

Garantia

A HS Technology garante este produto pelo período de **1 ano**, contado a partir da emissão da Nota Fiscal.

A garantia **não cobre**:



- Mau uso;
 - Quedas ou impactos;
 - Modificações realizadas no produto;
 - Desgaste natural decorrente do uso;
 - Utilização em desacordo com as instruções deste manual.
-

Assistência e Contato

Endereço: Rua Marcos Tomazini, 158. Portal de Versalhes I. 86057-060 Londrina - PR - Brasil

Telefone: +55(43)3327-7007

WhatsApp: +55(43)99936-0112

E-mail: sac@hs.ind.br

Site: <https://www.podotech.com.br/suporte>