

CERTIFICADO DE GARANTIA

A HS Technology garante este produto pelo período de 1 (um) ano a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Estão excluídos da garantia os problemas gerados por acidentes mecânicos, mau uso ou forças da natureza.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpar somente com pano umedecido com água e sabão neutro;

- Não utilizar álcool para limpeza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão: 380 x 195 x 16 mm

Peso: 540 gramas (total 1,15kg)

Composição: alumínio, acrílico, borracha e couro sintético.

Acompanham o produto: rolete emborrachado, tinta e almofada para carimbo, bloco de platigrafia.

Manual do Usuário V1.5

CONTATO

Rua Marcos Tomazini, 158.

Portal de Versalhes I.

86057-060 Londrina - PR - Brasil

Telefone: +55(43)3327-7007

E-mail: sac@hs.ind.br

Whatsapp: www.podotech.com.br/suporte

Site: www.podotech.com.br/assistencia-tecnica

Plantígrafo

PODO*tech*[®]

O PRODUTO

Aparelho para obter a plantigrafia.



MODO DE USAR



1 - Para realizar a plantigrafia, os seguintes itens são necessários: o plantígrafo, almofada de carimbo, papel sulfite e rolo de pintura.



2 - Tingir o rolo de pintura com tinta na almofada de carimbo.



3 - Passar o rolo banhado de tinta na superfície texturizada do plantígrafo.



4 - Garantir que a tinta envolva toda a superfície pintando no sentido horizontal e vertical.



5 - Colocar o papel a ser carimbado em um plano liso e deitar o plantígrafo com a superfície pintada na face em contato com o papel.



6 - O paciente irá pisar com firmeza no centro do plantígrafo.



7 - Repita o processo para fazer os dois pés.